

Helight

L'action de la lumière Helight sur la cicatrisation des plaies et sur les tissus cicatriciels concerne aussi bien les plaies non infectées, propres, que les plaies infectées où à risque.

La lumière Helight est une aide précieuse pour les interventions chirurgicales. Elle s'utilise avant, pendant et après l'intervention. Elle favorise la relaxation et accélère la mise en route du processus de cicatrisation.

Protéger les yeux de l'animal avec une muselière de contention, un masque opaque ou tout simplement avec les mains si la lumière est dirigée vers ses yeux.

Positionner l'appareil Helight à une quinzaine de centimètres de la zone à traiter.

Protocole	Durée (minutes)	Fréquence (par semaine)	Traitement (durée de la cure)
Douleur, Œdème, Inflammation, mobilité réduite	7	2	1 - 3 sem
Cicatrisation des plaies récentes, propres, non infectées	15	2	3 sem
Cicatrisation des plaies chroniques, infectées ou à risque	15	2	4 - 6 sem
INTERVENTIONS CHIRURGICALES			
Pré-opératoire	6	1	unique
Per-opératoire - pendant, au-dessus de la table d'opération			
Post-opératoire	12	2	3 sem
INDICATIONS ESTHÉTIQUES			
Repousse des poils	15	2	Au besoin
Beauté et brillance des poils	15	2	Au besoin
Relaxation, anti-stress, humeur	10	1	Au besoin
Beauté du museau et des dents	7	1	Au besoin
Beauté des griffes	7	1	Au besoin
Agilité	11	2	3-4 sem

Les oiseaux ont une sensibilité particulière aux rayonnements électromagnétiques et ne peuvent donc pas être traités comme les autres animaux. Pour les oiseaux, **NE PAS UTILISER LES PROTOCOLES HABITUELS**. La lumière Helight s'utilise pour tranquilliser l'oiseau avant une manipulation ou un prélèvement, et pour le calmer du stress suite à une manipulation.

Durée d'illumination : 10 SECONDES